



Aluständer. Eine wertstabile Anlage für Ihre Fräser.

Der Instrumentenständer von Komet Medical® ist aus eloxiertem Aluminium und damit besonders hochwertig und langlebig. Er verbindet die gewünschte Funktionalität mit Individualität. Stellen Sie sich Ihr Instrumentenset individuell zusammen und lagern bzw. reinigen Sie es problemlos in einem der drei angebotenen Ausführungen.

Anwendungshinweise:

- Desinfektion und Reinigung nur in Verbindung mit einem geeigneten Desinfektionsbad (z. B. Komet DC1®)
- Bei Reinigung und Desinfektion sind die Herstellerhinweise hinsichtlich Materialverträglichkeit, Konzentration und Einwirkzeiten zu beachten
- Eventuell entstandene Flecken direkt nach der Desinfektion abwischen
- Vor der Sterilisation ist der Arbeitsständer unter fließendem Wasser abzuspülen und insbesondere in den Bohrungen gründlich zu trocknen (z. B. mittels Luftstrom)
- Nach erfolgtem Spülen und Trocknen den Arbeitsständer in Sterilisationsfolie einschweißen und im Autoklav bei maximal 2,2 bar und 135°C sterilisieren



für 15 Instrumente
for 15 instruments

A700S



für 23 Instrumente
for 23 instruments

A702S



für 40 Instrumente
for 40 instruments

A701S

