




Kompass | Fußpflege & Podologie

Compass | Chiropody & Podiatry



Anwendungs- und Drehzahlempfehlungen · Recommendations for use/recommended speeds

-  geeignet | Trockentechnik
suitable | dry technique
-  geeignet | Nasstechnik
suitable | wet technique

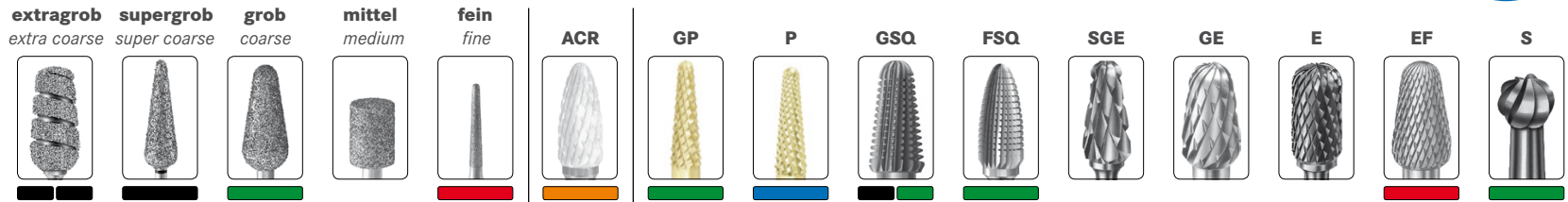

Drehzahlempfehlung: $\varnothing_{\text{rot}} / \text{min}^{-1}$	5000-15000	5000-20000	5000-25000	5000-30000	5000-40000	5000-15000	5000-15000	5000-20000	5000-15000	5000-20000	5000-10000	5000-12000	5000-15000	5000-20000	5000-20000
Anwendungen Applications	Diamantschleifer Diamond abrasives					Keramik Ceramics	Hartmetallfräser Tungsten carbide cutters								
Abtragen starker Hornhaut und Schwielen Removal of very hard skin and calluses	Orange	Blue	Orange	Blue		Orange	Blue				Orange	Blue			
Universelle Hornhautbearbeitung Universal treatments of hard skin			Orange	Blue		Orange	Blue	Orange	Blue	Orange	Blue				
Bearbeitung von stark verdickten Nägeln und Nagelmykosen Treatment of severely thickened nails and fungal infections of the nail			Orange	Blue		Orange	Blue	Orange	Blue		Orange	Blue	Orange	Blue	Orange
Entfernung von Hühneraugen Removal of corns					Orange	Blue									Orange
Nagelglättung und Nagelfalzbearbeitung Nail smoothing and treatment of the nail fold				Orange	Blue	Orange	Blue		Orange	Blue			Orange	Blue	Orange
Hautglättung und Nagelhautbearbeitung Cleaning of the nail and the nail fold				Orange	Blue	Orange	Blue				Orange	Blue			
Reinigung von Nagel und Nagelfalz Nail smoothing and treatment of the nail fold and fungal infections of the nail															
Nagelpolitur Polishing of nails															
Bearbeitung von Orthesenkunststoffen Work on orthotic acrylics														Orange	Orange

